

Прибор мягкой теплоты



ТЕПЛОВОЙ КОВРИК

Модель CGN-1000-3М

Инструкция по применению



Amethyst BioMat



CE

EAC



СОДЕРЖАНИЕ

01	Технические характеристики ---	1
02	Вступление -----	2
03	Описание изделия -----	3
04	Эксплуатация -----	3
05	Назначение -----	4
06	Внимание -----	5
07	Меры Предосторожности -----	5
08	Ограничения -----	5
09	Обслуживание и хранение -----	6
10	Гарантия -----	6

Благодарим за то, что Вы приобрели Электрический бытовой прибор мягкой теплоты: коврик, модель CGN-1000-3М (далее Тепловой коврик, **Amethyst BioMat**). Внимательно читайте инструкцию по применению перед использованием. Внимание: компания оставляет за собой право по внесению изменений в инструкцию без уведомления потребителя. Данное изделие не является медицинским, предназначено для домашнего использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- НАИМЕНОВАНИЕ и ТИП: Электрический бытовой прибор мягкой теплоты: коврик;
- МОДЕЛЬ: CGN-1000-3М; СРОК СЛУЖБЫ: 5 лет;
- НАПРЯЖЕНИЕ: 220 В; МОЩНОСТЬ: 120 Вт;
- ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ: +30°C - +75°C +\-5°C;
- ГАБАРИТЫ: 1800x700x15мм; ВЕС НЕТТО: 12 КГ;
- МЕСЯЦ И ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 10.2016.

Продукция соответствует Техническим регламентам Евразийского экономического союза: ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".



ВСТУПЛЕНИЕ


Спектр биологического воздействия.

Научно доказано, что в Природе спектр 4~16 микрон является необычайно важным для существования и роста человека и всех живых организмов, поэтому этот спектр называется «лучи жизни», «жизненной энергией» и т.д. Человеческое тело само по себе является источником излучения биологического спектра, испуская 5~25 микронов, таким образом, тело способно поглощать данный спектр излучения, при этом спектр 4~16 микронов наилучшим образом поглощается человеческим телом. Биогенетический слой испускает спектр 3,6~16 микронов, его частота резонирует с движущейся частотой молекул воды между клетками и атомами. Когда этот спектр облучает тело, начинается процесс поглощения, передачи и отражения, который ученые называют «биорезонанс». Поглощение подобной энергии приводит к ощущению жара, после чего активируются молекулы воды, усиливается синтез жизненно важных ферментов и активируются протеины, укрепляя иммунитет и усиливая регенерирующие свойства клеток, ускоряя микроциркуляцию крови, восполняя запасы ферментов и питательных веществ, а поскольку спектр позволяет многочисленным полезным микроэлементам быстрее проникать в тело, то совокупность всех вышеуказанных факторов способна оказывать положительное воздействие на весь организм.

Длинноволновые инфракрасные лучи проникают до 13 см в тело человека. Эти лучи проникают не только в кожу и мышечную ткань, но и в более глубокие ткани такие как лимфатические железы, кровеносные сосуды, нервы и клетки внутренних органов.

Аметист.

Успокаивающие свойства кристаллов аметиста известны с древних времен. Аметист используют для снятия стресса, укрепления эндокринной и нервной систем, увеличения активности правого полушария мозга, нормализации действия эпифиза и гипофиза, очищения крови и подъема энергетики. Он регулирует кроветворение и улучшает кровообращение. Помогает при лечении умственных расстройств, гармонизирует все уровни сознания, способствует повышению интеллекта и многостороннему развитию личности.

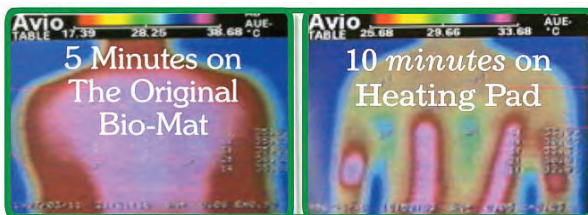




ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Комплектность:

1. Тепловой коврик (*Amethyst BioMat*).
2. Пульт управления с проводом подключения.
3. Чехол.
4. Инструкция.

1.

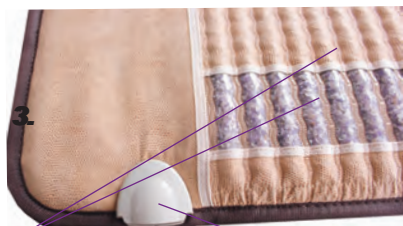

ЯЧЕЙКИ
С КРИСТАЛАМИ
АМЕТИСТА

220В КЛЕМА
ПОДСОЕДИНЕНИЯ
С ПУЛЬТОМ
УПРАВЛЕНИЯ

2.



ЦИФРОВОЙ
ЭКРАН
ТЕМПЕРАТУРЫ

КРАСНЫЙ
ИНДИКАТОР
ЭЛ.ПИТАНИЯ

КНОПКА
Вкл / Выкл

МИНИМАЛЬНАЯ
ТЕМПЕРАТУРА
30°C

МАКСИМАЛЬНАЯ
ТЕМПЕРАТУРА
75°C

РЕГУЛЯТОР
ТЕМПЕРАТУРЫ

3.



4.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Выньте Тепловой коврик из чехла, разверните и положите на ровную поверхность.
2. Изделием можно пользоваться в кресле, на полу, софе или кровати сидя или лежа в любой позе.
3. Подключите пульт управления к изделию к эл.розетке 220В. Нажмите кнопку Вкл/Выкл, на экране появится текущая температура и загорится красный индикатор справа от цифрового экрана. Установите желаемую температуру (+30°C- +70°C) регулятором температуры на ПУ и срасположитесь на Тепловом коврике в удобной позе (сидя или лёжа).



4. Эргономичный дизайн позволяет использовать как лежа так и сидя на нем в кресле. Возможно использовать изделие накрывшись сверху для обогрева в области грудной клетки или в области живота и бедер.
5. Будьте осторожны при использовании изделия на температурах $+55^{\circ}\text{C}$ - $+70^{\circ}\text{C}$, возможны ожоги.
6. Используйте изделие в одежде из хлопчатобумажной ткани во избежание ожогов.
8. При использовании *Теплового коврика* на низких температурах на нем можно спать всю ночь.
9. После использования, нажмите кнопку Вкл/Выкл и отключите *Теплового коврика* от эл.сети.

НАЗНАЧЕНИЕ

Тепловой коврик предназначен для обогрева тела. Рекомендовано использовать изделие при комфортном температурном режиме.

1. Тепловой коврик способствует усилению кровообращения и поддержанию сердечно-сосудистой системы.

Длинноволновые инфракрасные волны повышают температуру тела, способствуя расширению кровеносных сосудов.

2. Тепловой коврик способствует поддержанию иммунитета.

Повышение температуры тела с помощью BioMata способствует активизации иммунитета.

3. Тепловой коврик способствует снятию мышечных болей.

Согревание способствует снятию спазма и напряжения мышц, что может помочь облегчить боль в мышцах.

4. Тепловой коврик может помочь снизить вес.

Применение изделия при температурном режиме от $+55^{\circ}$ - $+70^{\circ}\text{C}$ $\pm 5^{\circ}\text{C}$ способствует усилению потоотделения, что способствует похудению.

5. Тепловой коврик способствует снижению стресса и усталости.

Приятное тепло способствует расслаблению, может помочь успокоить нервы и расслабить уставшие мышцы. Конечным результатом может стать снижение стресса и прилив сил.

6. Тепловой коврик может способствовать улучшению состояния кожи.

ИК тепло, проникая глубоко в тело способствует детоксикации и стимулированию выработки коллагена.

7. Тепловой коврик способствует выведению токсинов.

Прогревание тела с помощью изделия способствует стимулированию потовых желез и усилению потоотделения, которое может помочь выведению шлаков, токсинов и детоксикации организма.



ВНИМАНИЕ

1. Оборудование не является медицинским изделием и не предназначено для лечения и профилактики заболеваний. Является бытовым электроприбором, предназначенным для обогрева тела.
 2. Не допускайте использования оборудования несовершеннолетними детьми и/или лицами с ограниченными физическими или умственными способностями без присмотра взрослого.
 3. При наличии хронических заболеваний или острого болезненного состояния, перед применением изделия необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
 4. Пожалуйста, немедленно прекратите использование изделия при обнаружении ниже перечисленных признаков, во избежание поломки или несчастного случая.
 - Выключите питание;
 - Извлеките вилку из розетки и свяжитесь с сервисным центром или с продавцом для консультации и ремонта. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать изделие.
1. Если изделие повреждено или внутрь изделия попала вода.
 2. Если поврежден контроллер, сетевой шнур или эл.вилка (на Пульте управления высветилась ошибка E1).
 3. Если присутствует запах гари или от массажера исходит дым.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Тепловой коврик

1. Используйте **Тепловой коврик** по назначению.
2. При появлении статического электричества, немедленно отключите **Тепловой коврик** и проверьте, подключен ли заземляющий провод.
3. Регулярно проверяйте состояние изделия. Если **Тепловой коврик** поврежден, свяжитесь с продавцом или обратитесь в сервисный центр.
4. Используйте Пульт управления, предназначенный только для этого изделия.
5. Не используйте изделие во влажном помещении. Не мойте **Тепловой коврик**, используйте сухие салфетки для чистки.
6. Держите вдали от легковоспламеняющихся предметов.
7. Подключайте **Тепловой коврик** к электрической розетке только надлежащего эл.питания (220В).
8. Не оставляйте изделие без присмотра во включенном состоянии.
9. Лицам с повышенной чувствительностью к теплу или тонкой чувствительной кожей, а также лицам с сахарным диабетом следует соблюдать осторожность при пользовании изделием. Устанавливайте температуру не более 45гр.С во избежание ожогов.
10. В случае погрешности в работе немедленно отключите BioMat.
11. Не пользуйтесь изделием, если оно намокло.
12. Во время использования изделия дети должны находиться под присмотром взрослых, температура должна быть настроена не более +45гр.С.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не рекомендуется использовать оборудование при:

- Острых заболеваниях;
- Злокачественных опухолях;
- Высокой температуре;
- Потере чувствительности;
- Воспалении на участках кожи, где используется изделие.



ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

1. Используйте только сухую ткань при чистке изделия или силового кабеля.
2. Обязательно выньте вилку шнура питания из электрической розетки перед чисткой изделия.
3. Не используйте бензин, растворитель или любые другие абразивные растворители для чистки изделия.
4. Храните изделие в сухом и не пыльном помещении, аккуратно свернув кабель питания.
5. Не оставляйте изделие под воздействием прямых солнечных лучей или высокой температуры.
6. Во избежание удара электрическим током или выхода изделия из строя, не подключайте или отключайте изделие влажными руками.
7. Не кладите на изделие тяжелые предметы.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок на изделие составляет 1 год с момента передачи товара покупателю. Оборудование предназначено для домашнего использования в бытовых целях. В случае использования оборудования в коммерческих целях гарантийный срок сокращается до 6 месяцев с момента передачи оборудования покупателю. В случае возникновения неисправностей обратитесь в ближайший сервисный центр или к продавцу, у которого Вы приобрели данное оборудование.

Наименование		ПРОДАВЕЦ:
Серийный номер модели		
Покупатель		Юр.АДРЕС:
Адрес		
Телефон		
Дата покупки		ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД 1 год с момента передачи покупателю.

Данной подписью покупатель подтверждает, что ознакомился и соглашается с условиями гарантии, получил инструкцию по применению на русском языке, и подтверждает, что оборудование проверено в его присутствии и находится в рабочем состоянии

Гарантия не распространяется в следующих случаях.

1. В случае нарушений правил и условий эксплуатации.
2. Если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта.
3. Механические повреждения.
4. Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей и насекомых.
5. Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.

Изготовитель: ЗЕДЖАНГ МЕДИЦИНС & ХЭЛС ПРОДАКТС И/Э КО., ЛТД. ЗМС БИЛДИНГ, 101-2, Н.ЖОНГШАН РОУД, ХАНЖУ, 310003, КИТАЙ. Тел.: +8657128935872.

Страна изготовитель: Китай.

Импортер: ООО "Лотос", 119602, Москва, ул. Академика Анохина-38/1, www.llotus.ru
эл.почта: info@llotus.ru