


Г x Y , ~ τ · Y , ~ · x | x - , ,
- | ° ~ | ° 1 , "



www.lotus.ru

Гарантия
массажный стол
Модель R-522

Инструкция по использованию

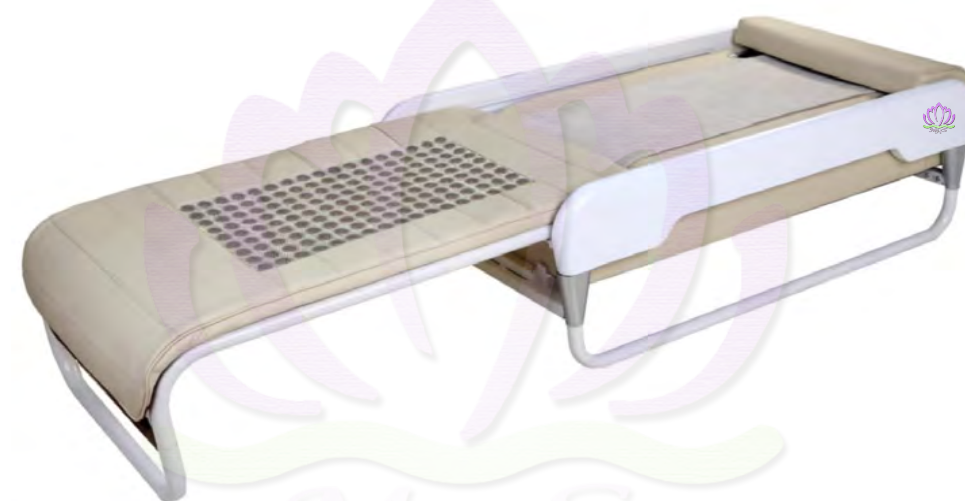

EAC

← o ^ h ' ~ e
* <

Введение -----	1
Назначение аппарата -----	2
Технические характеристики -----	4
Комплектность -----	5
Сборка -----	7
Описание аппарата -----	12
Панель подключения-----	14
Пульт управления -----	15
Меры предосторожности-----	17
Управление аппаратом -----	25
Автоматические программы -----	33
Неисправности и порядок их устранения -----	35
Гарантия -----	36

Данный аппарат предназначен для проведения массажа в домашних условиях или в спортивных учреждениях. Массажер способен оказывать положительное воздействие на весь организм. Сеансы массажа на аппарате способствуют расслаблению, снятию напряжения с мышц спины, снятию нервного напряжения, улучшению кровообращения, улучшению качества сна, снятию боли в мышцах, вызванной перенапряжением или долгим пребыванием в неудобных или статичных позах. Массажер рекомендуется использовать при физическом или нервном переутомлении, после тяжелой физической нагрузки или после физических тренировок, при болях в мышцах.



Аппарат предназначен для бытового применения в целях проведения общеукрепляющего и расслабляющего массажа в домашних условиях или в спортивных учреждениях. Массажер способен оказывать положительное воздействие на весь организм. Сеансы массажа на аппарате способствуют расслаблению, снятию напряжения с мышц спины, снятию нервного напряжения, улучшению кровообращения, улучшению качества сна, снятию боли в мышцах, вызванной перенапряжением или долгим пребыванием в неудобных или статичных позах. Массажер рекомендуется использовать при физическом или нервном переутомлении, после тяжелой физической нагрузки или после физических тренировок, при болях в мышцах.

Многофункциональный аппарат может оказывать одновременно 6 воздействий на человеческий организм:

эффекты разминающего массажа, разгрузки позвоночника, акупрессуры, релаксации, теплового воздействия длинноволновым инфракрасным излучением, звуко-релаксации.

Эти методы воздействия разработаны на основании опыта восточных традиций здоровья и долголетия.

Согласно этим методам, для обеспечения многолетнего хорошего самочувствия телу нужен ежедневный уход, т.е. определенная культура здоровья, отличная от западной культуры. В восточную культуру здоровья, кроме чистоты тела, входит массаж, гимнастика с элементами разгрузки позвоночника, инфракрасное тепло, релаксация, дыхательная гимнастика, здоровое питание и регулярное очищение организма. Воздействие аппарата включает основные элементы восточной культуры здоровья.



Назначение аппарата

Для наилучшего эффекта от применения массажера рекомендуется проводить сеансы массажа ежедневно. Допускается неоднократное использование массажера в течение дня.








ВНИМАНИЕ:

1. Аппарат массажный многофункциональный модель R-522 не является медицинским изделием и не предназначен для лечения или профилактики заболеваний. Является бытовым электроприбором для домашнего применения.
2. В случае наличия хронических заболеваний или острого болезненно состояния перед применением аппарата необходимо проконсультироваться с врачом.



Технические характеристики

Тип, наименование и модель		Электрический прибор вибромассажный бытового назначения: аппарат для массажа тела многофункциональный, модель R-522
Рабочее напряжение		AC220V±10% 50Гц±1 AC110V±10% 60Гц±1
Потребляемая мощность		С нагревом 350Вт±10%; без нагрева 45Вт±10%;
Дата изготовления		03.2024
Наименование технических регламентов, которым соответствует изделие		Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
Условия окружающей среды	Температура при транспортировке и хранении	-40°C ~ +70°C
	Атмосферное давление при транспортировке и хранении	500hpa ~ 1060hpa
	Влажность при транспортировке и хранении	10%~100%
	Рабочая температура окружающей среды	-5°C ~ +40°C
	Рабочее атмосферное давление	700 ~ 1060hpa
	Рабочая влажность воздуха	30%~75%
Параметры аппарата	Максимальная высота подъёма роликов	60мм±10%
	Максимальная высота подъёма спины	45мм±10%
	Максимальный вес, поднимаемый роликами	60 кг
	Максимально допустимый вес пользователя	135kg
	Максимальная длина зоны массажа роликами	690мм±5
	Ширина зоны массажа роликами	190мм±5
	Диапазон установки температуры	+30°C ~ +65°C ±5°C
	Диапазон установки времени	По умолчанию 37 минут. Установка 1-90 минут
Габариты	В разложенном состоянии	(Д)2000мм x (Ш)710мм x (В)420мм
	В сложенном состоянии	(Д)1280мм x (Ш)710мм x (В)420мм
Вес	Нетто	69 кг
	Брутто	71 кг
Срок службы		10 лет

Комплектность

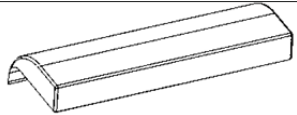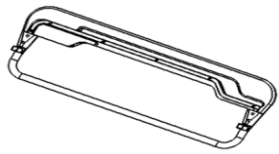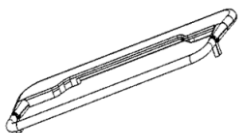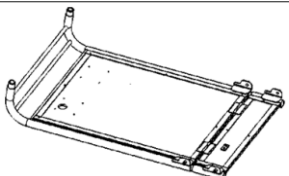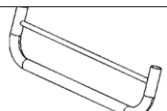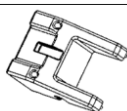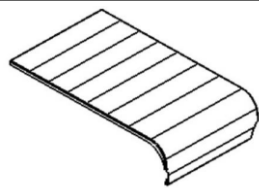	Основной мат - 1шт
	Подушка - 1шт
	Защитная простынь - 1шт
	Левый поручень каркаса - 1шт
	Правый поручень каркаса - 1шт
	Рама основного мата - 1шт
	Каркас дополнительного мата - 1шт
	Ножка дополнительного мата - 1шт
	Подставка дополнительного мата - 2шт
	Нагревательный элемент для вспомогательного мата - 1шт (с нефритовой нагревательной панелью).

Комплектность

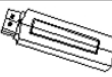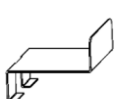
	Пульт управления - 1шт
	Соединительный шнур пульта управления - 1шт
	Внешние прожектора: 3 –сферный - 1шт 9 –сферный - 1шт
	Кабель подключения внешнего прожектора - 1шт
	Шнур питания - 1шт
	Кабель подключения дополнительного мата - 1шт
	USB-карта - 1шт
	Подставка пульта управления - 1шт
	Винт M6X12 - 8шт
	Винт M5X10 - 2шт
	Винт M4X10 - 5шт
	Зажим для пружины - 1шт
	Ограничительная пластина основного корпуса аппарата - 1шт

Напоминаем: Для эффективной и безопасной сборки изделия предварительно необходимо ознакомиться с инструкцией. Нарушение требований по сборке изделия могут привести к повреждению оборудования.


Примечание:

- Производите сборку на ровной поверхности;
- Пожалуйста поместите простынь на поверхности основного мата при сборке для предотвращения появления царапин на поверхности основного мата.

Аппарат в разложенном виде

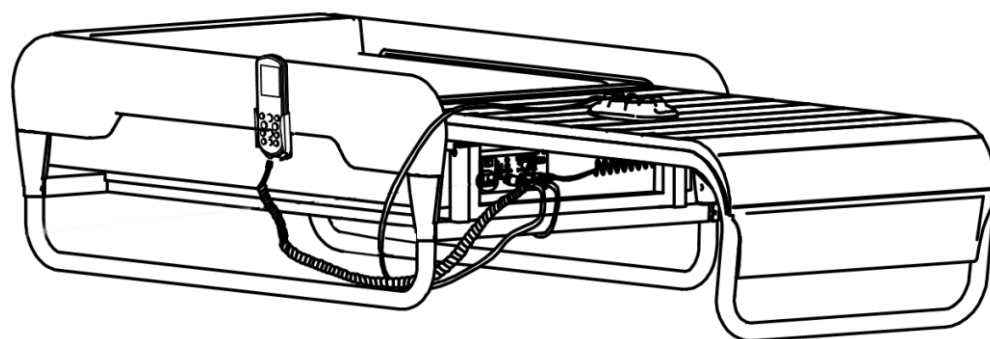


Аппарат в сложенном виде

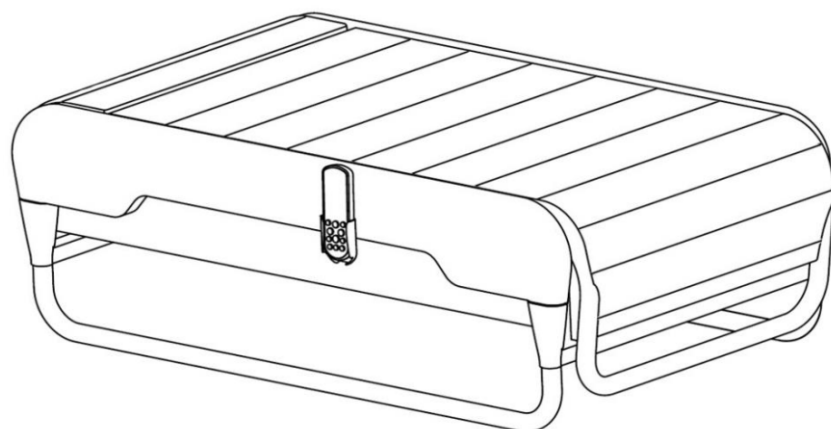

Шаг 1. Установка каркаса дополнительного мата.


1. Установка подставок дополнительного мата.

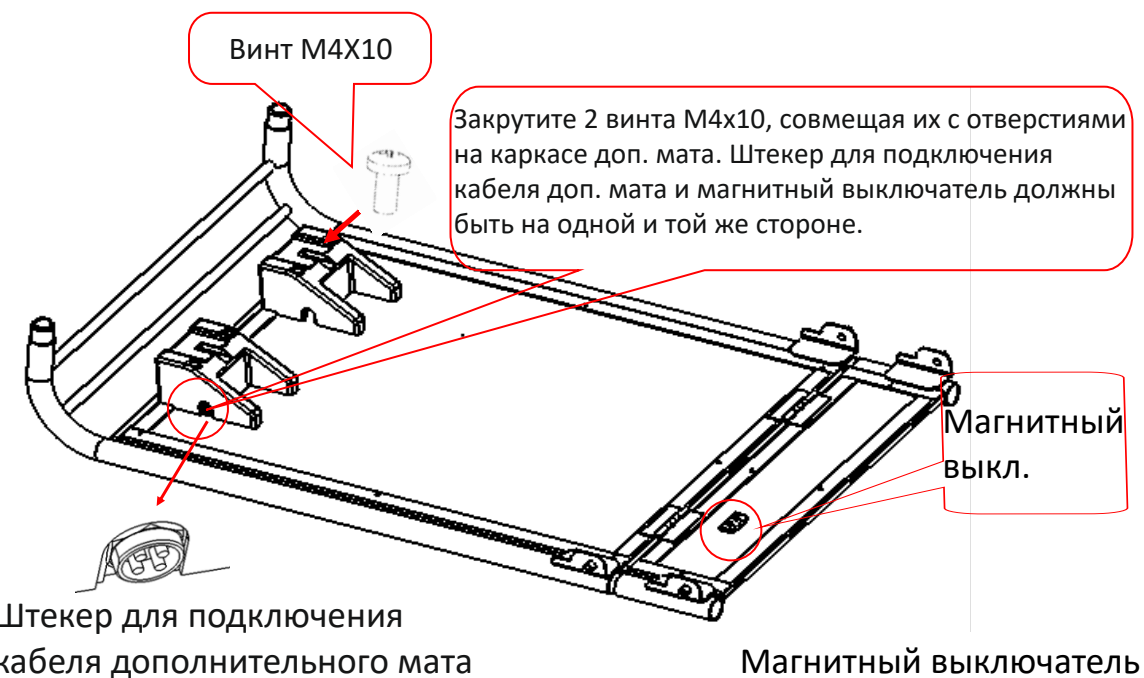

Штекер для подключения
кабеля дополнительного мата

Магнитный выключатель

2. Подсоединение кабеля нагревательного элемента доп. мата

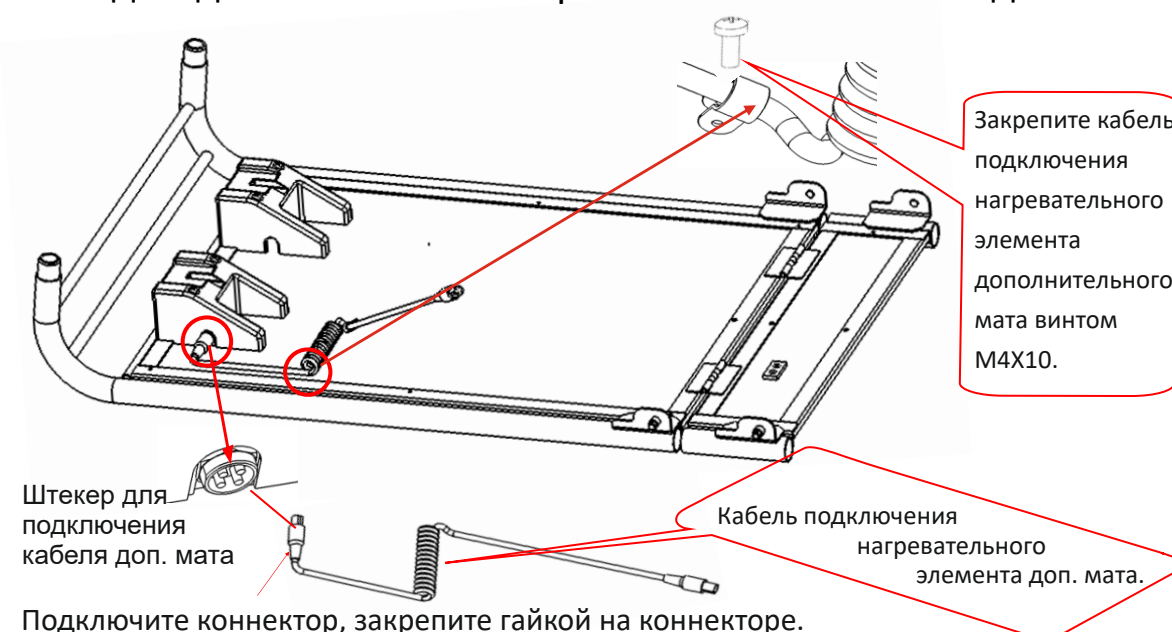

Штекер для
подключения
кабеля доп. мата

Подключите коннектор, закрепите гайкой на коннекторе.

Кабель подключения
нагревательного
элемента доп. мата.


Закрепите кабель
подключения
нагревательного
элемента
дополнительного
мата винтом
M4X10.

3. Установка ножки дополнительного мата.




Шаг 2: Установка основного каркаса.

1. Установка поручня и рамы основного мата.

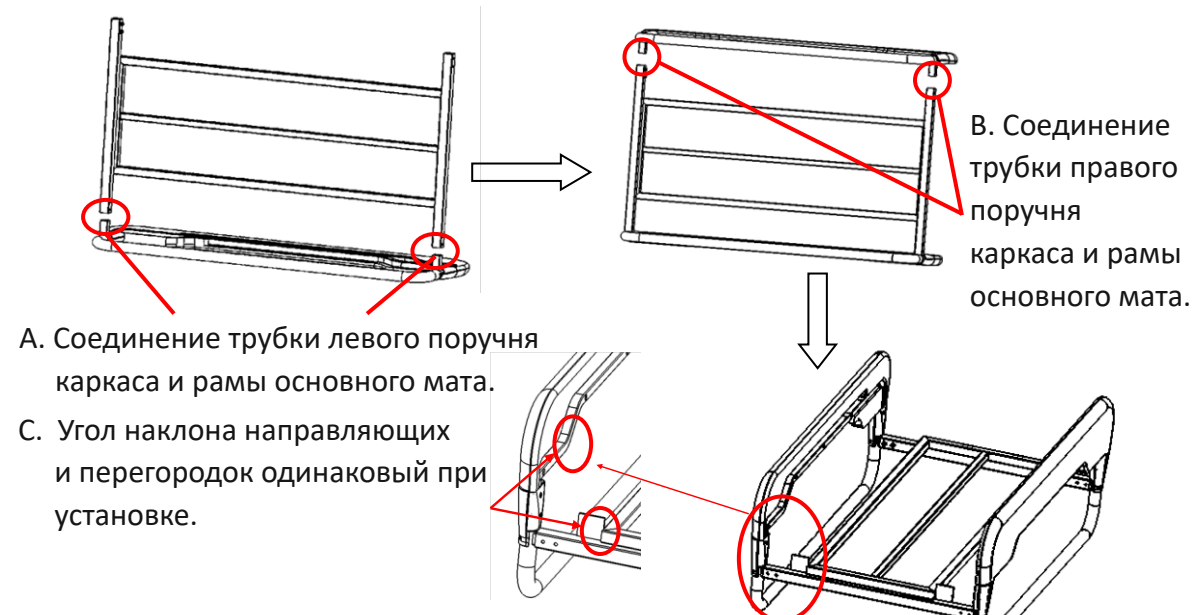


Примечание: после размещения поручней и рамы основного мата сначала закрутите одну сторону, вторую - после установки каркаса доп. мата.


2. Соединение основного каркаса и рамы дополнительного мата.

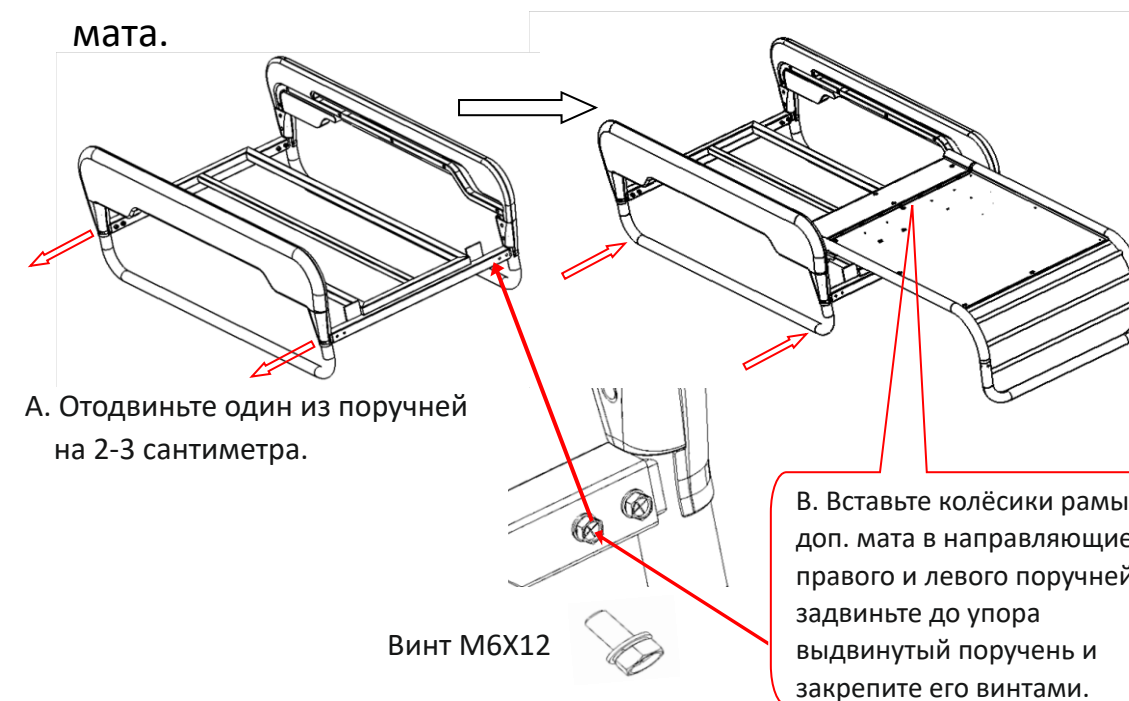


Шаг 3: Установка нагревательного элемента доп. мата.

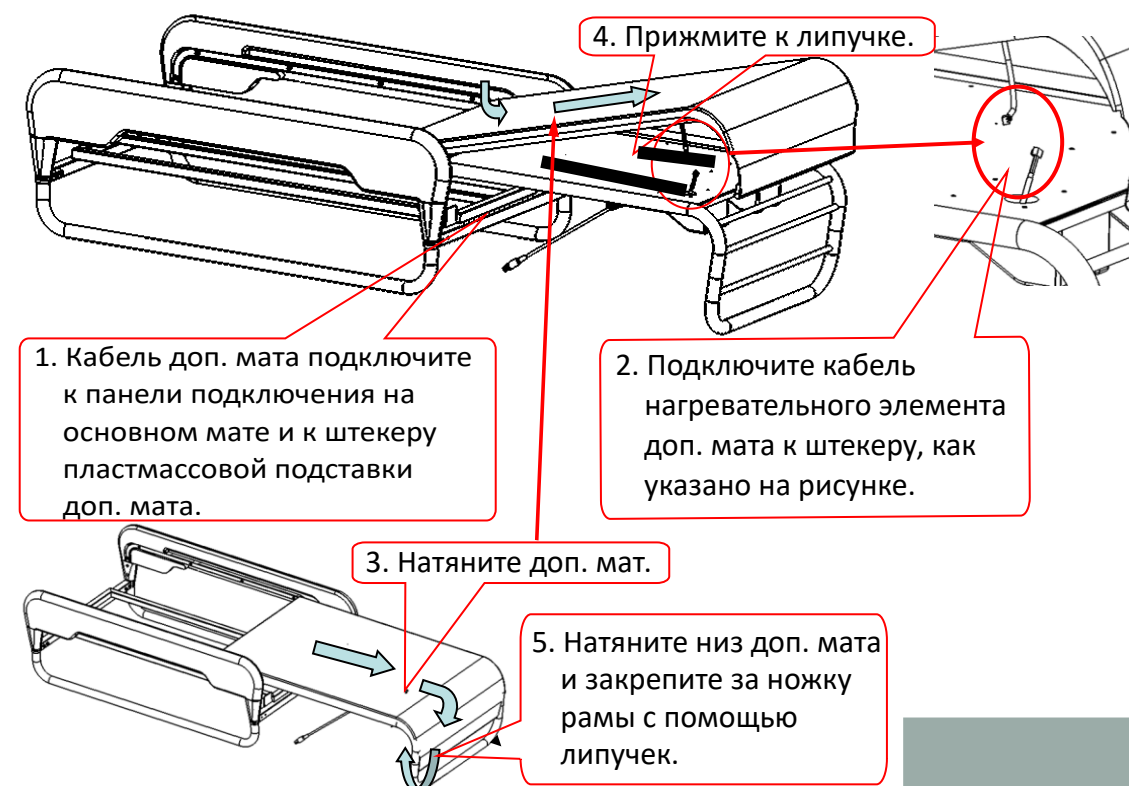

Шаг 4: Установка основного мата на раму.

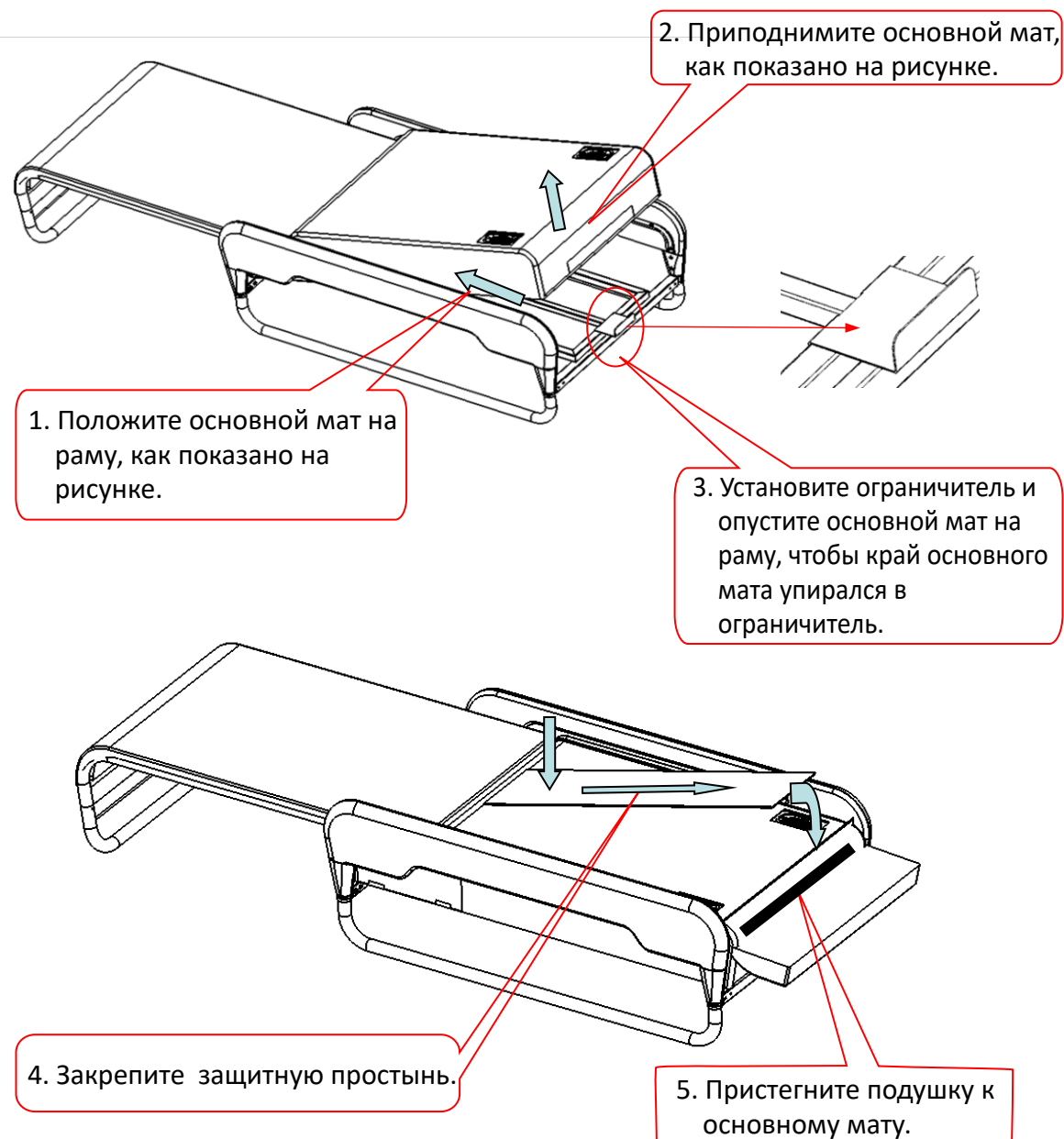

Описание аппарата

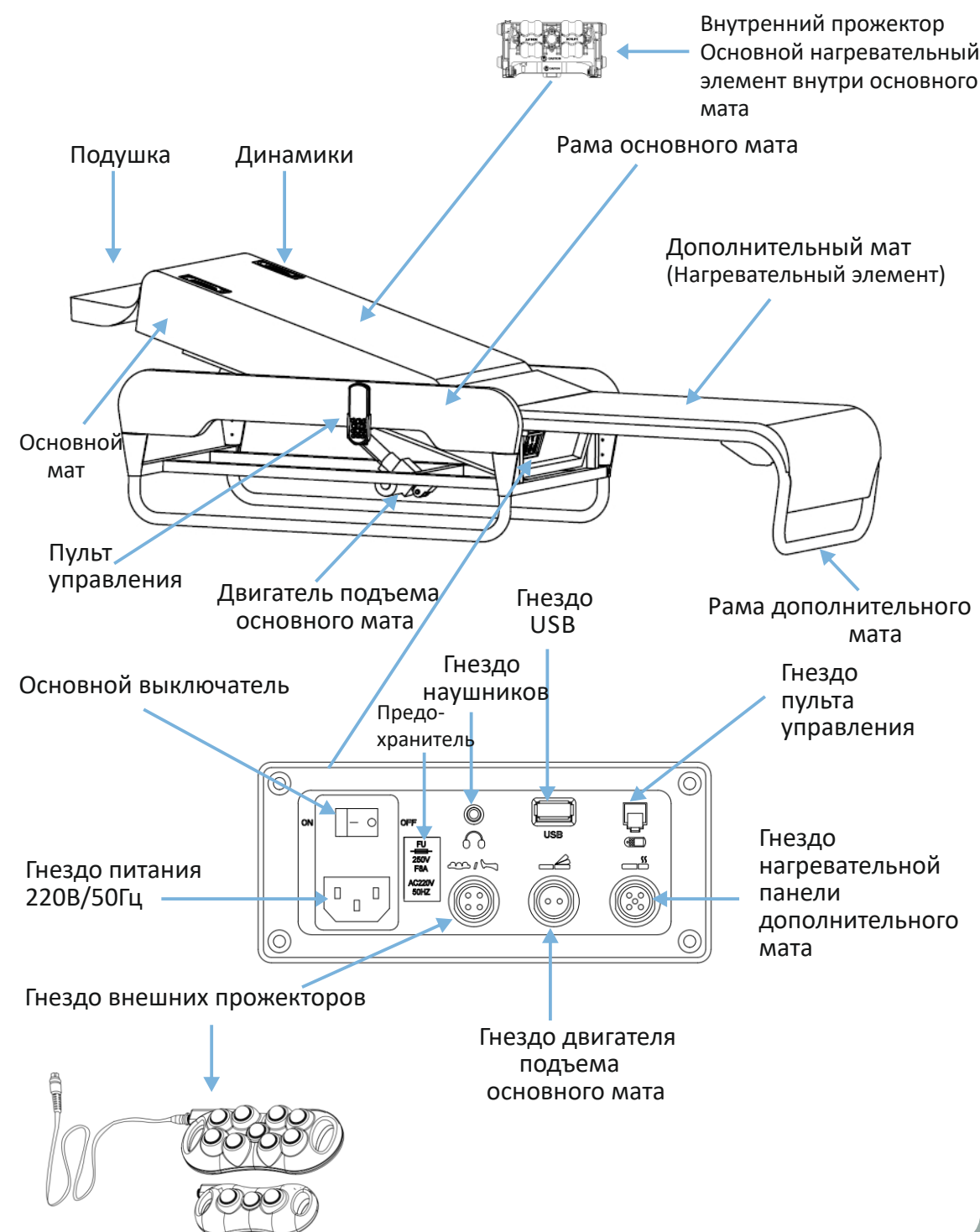

Описание аппарата

Аксессуары

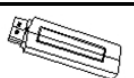
	Пульт управления
	Соединительный шнур пульта управления
	Внешние прожектора 3 –сферный 9 –сферный
	Кабель подключения внешнего прожектора
	Шнур питания
	USB-карта
	Подставка пульта управления

Схема установки подставки для пульта управления



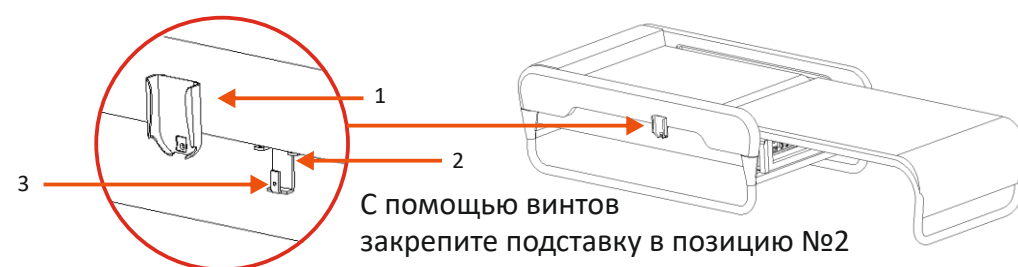


Схема подключения проводов

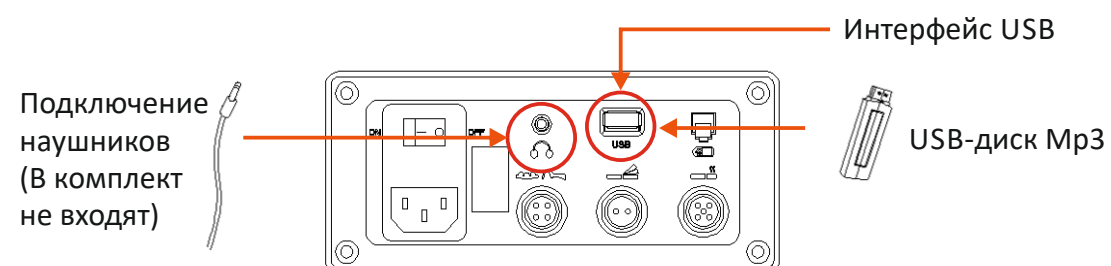


Панель подключения


Панель подключения

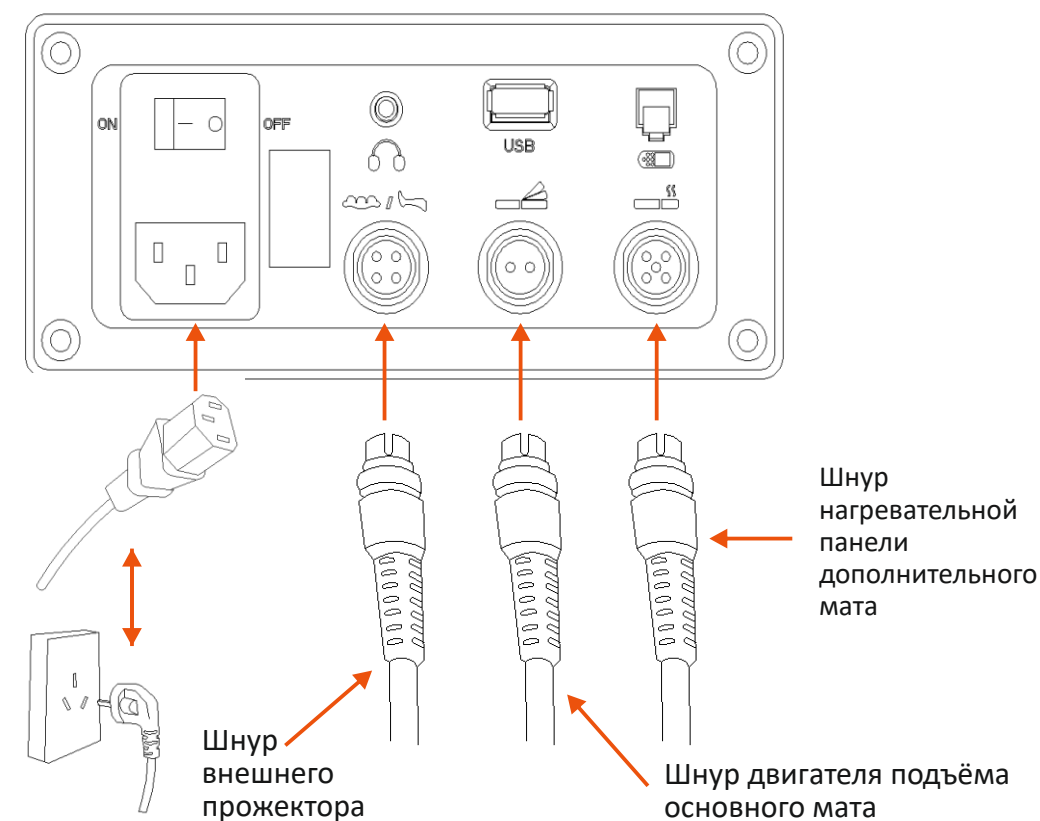

Подключение пульта управления

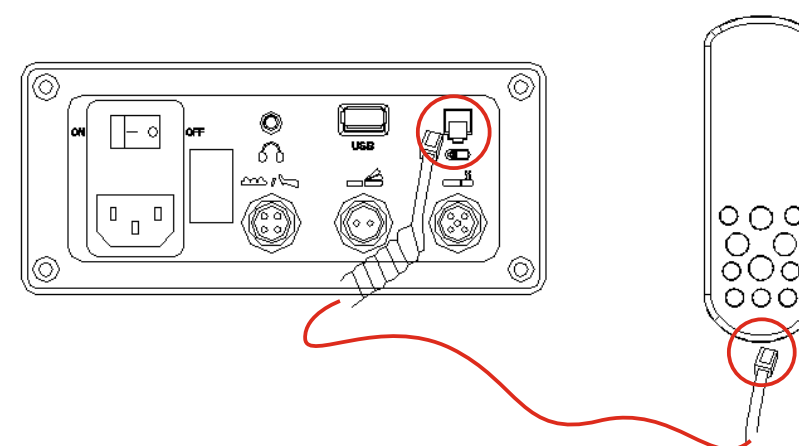

Пульт управления

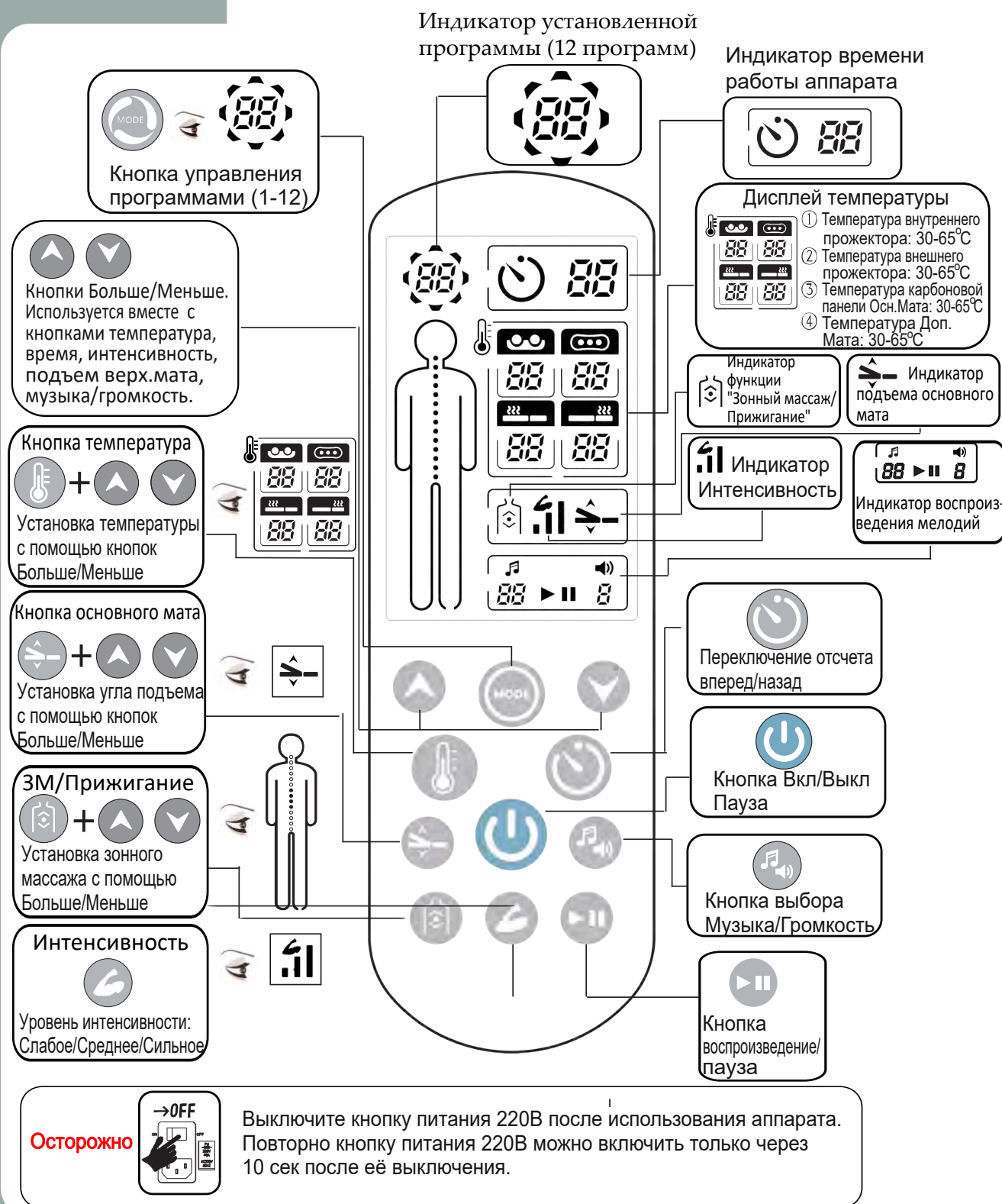

Пульт управления

Автоматический режим (AP)		Индикация выбранного режима, мигающая секция означает текущий режим. Бегающие по кругу стрелки означают работу выбранного режима (программы).
Положение массажных роликов		Точки показывают положение внутреннего прожектора (роликов) на теле
Знак <i>Время работы</i>		Показывает отсчет времени в обратном направлении. Диапазон установки времени в режиме автоматических программ от 10 до 90 минут. По умолчанию время работы 1-й программы 37 мин, 2-6 программ ~45 мин. Время работы Зонного массажа (ЗМ) 10 мин, Прижигания 3 мин.
Знак <i>Температура</i>		Индикация температуры внутреннего прожектора. Диапазон настройки температуры внутреннего прожектора +30°C- +65 °C. По умолчанию температура внутреннего прожектора установлена на +45 °C.
		Индикация температуры внешнего прожектора. Диапазон настройки температуры внешнего прожектора +30°C- +65°C. По умолчанию температура внешнего прожектора установлена на +45°C.
		Индикация температуры основного мата. Диапазон настройки температуры основного мата +30°C- +65°C. По умолчанию температура основного мата установлена на +45°C.
		Индикация температуры дополнительного мата. Диапазон настройки температуры дополнительного мата +30°C- +65°C. По умолчанию температура дополнительного мата установлена на +45°C.
Знак <i>Интенсивность</i>		Три уровня интенсивности подъема внутренних роликов. По умолчанию отключено.
Знак <i>Подъем Основного Мата</i>		Управление подъемом основного мата. Стрелка "Больше" поднимает, стрелка "Меньше" опускает.
Знак <i>Зонный Массаж (ЗМ)</i>		Время работы автоматически установлено на 10 минут (зона 120 мм). Через 10 мин возврат к автоматической программе.
Знак <i>Прижигание</i>		Время прижигания установлено ~3 мин. Во время прижигания ролики будут работать с функцией "Дыхание" (смотрите работу на стр.33). Через ~3мин возврат к предыдущей программе или ручную нажатием кнопки ЗМ/Прижигание 2 раза.
Знак <i>Музыкальный Трек</i>		Выбор треков от 1 до 99
Знак <i>Громкость музыки</i>		Выбор громкости от 1 до 6
Знак <i>Воспроизведение/Пауза</i>		Воспроизведение/пауза

Важные положения по технике безопасности

Не допускается использования оборудования несовершеннолетними детьми и/или лицами с ограниченными физическими или умственными способностями без присмотра взрослого, отвечающего за их безопасность. Не допускается использование оборудования в иных целях или иными способами, отличными от целей и способов, обозначенных в настоящей инструкции.

Приведённые ниже условные обозначения служат обеспечению безопасности пользователя и предотвращению повреждений. Перед использованием оборудования необходимо ознакомиться с инструкцией. Использование оборудования способами и в целях, отличных от указанных в инструкции является нарушением требований к эксплуатации изделия и влечет прекращение гарантийных обязательств.

Условные обозначения делятся на: "опасность", "внимание" и "осторожно" и их значения описаны ниже. Это картинка-символ, используемый для предупреждения опасных ситуаций или опасных методов управления.

Аппарат многофункциональный R-522 не является медицинским изделием и не предназначен для лечения и профилактики заболеваний. Изделие является электрическим прибором бытового назначения для домашнего применения. Не допускается применение изделия в иных целях, не указанных в инструкции.




ОПАСНОСТЬ

В случае нарушения инструкции, наиболее вероятна серьезная травма.



ВНИМАНИЕ

В случае нарушения инструкции, возможна серьезная травма.

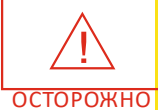

ОСТОРОЖНО

В случае нарушения инструкции, вероятны небольшие травмы или повреждения.

Наименее благоприятным условием работы является использование тепловых и массажных функций при нагрузке 135 кг и более на основной и вспомогательный мат.



ОПАСНОСТЬ

Будьте осторожны, чтобы не получить ожог от неправильного использования. Пожалуйста, тщательно следуйте инструкциям, чтобы уменьшить вероятность поражения электрическим током.

Предупреждения:

1. Во время использования аппарата, не держите при себе колющие или острые металлические предметы.
2. Пожалуйста, проверяйте раму аппарата перед использованием. Если есть трещины, поломки – прекратите использование аппарата и обратитесь к продавцу или в сервисный центр info@llothus.ru.

3. Не используйте аппарат не на ровной поверхности и в помещении с большой влажностью или при попадании в аппарат воды.
4. Внешние прожектора должны использоваться с чехлом, чтобы не было прямого контакта с кожей. (Риск получения ожога.)
5. Для предупреждения повреждения глаз, не направляйте внешний прожектор прямо в глаза.
6. В случае грома, молнии или землетрясения, пожалуйста, прекратите использование аппарата и отсоедините его от розетки. (Риск получения удара электрическим током или ожога).
7. Не тяните за шнур, чтобы отсоединить аппарат от сети и не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками.
8. Помимо режима массажа живота или в ручном режиме, не используйте изделие, лёжа лицом вниз. (Если изделие используется в положении лежа на животе не допускается использование внутренних роликов массажера в области грудной клетки, чтобы избежать травм).
9. В целях предотвращения травм от ожогов, возгораний и электрического тока, подключать аппарат нужно к розетке с заземлением. Проверяйте розетку, к которой подключаете аппарат перед применением.
10. Пользуйтесь только исправным укомплектованным аппаратом. (При использовании повреждённого аппарата возможны травмы или ожоги). Ни в коем случае не пытайтесь пользоваться аппаратом до устранения неисправности.
11. Если по завершению применения аппарата не планируете его использовать в долгосрочный период – отсоедините его от сети.
12. Кроме внешних прожекторов, входящих в комплект, не размещайте на аппарате другие изделия. (Перегрев может спровоцировать возгорание или удар электрическим током).
13. При использовании инвалидами и детьми, не оставляйте их без присмотра.
*Внимание! Держите детей в стороне от места, где установлен аппарат.
*Внимание! Убедитесь, что дети не прыгают на аппарате.
14. Не используйте аппарат при возникновении условий, перечисленных ниже. Обратитесь в сервисный центр для диагностики или ремонта:
 - Если аппарат падал или был поврежден;
 - Если в аппарат попала вода;

Меры предосторожности

- Если шнур или кнопка выключателя повреждены (Риск удара электрическим током или возгорания)..
- 15. Держите шнур питания подальше от электронагревателей и прочих горячих поверхностей.
- 16. Этот аппарат спроектирован для использования в помещениях.
- 17. Не используйте его вне помещений.
- 18. Не используйте аппарат, в пыльных помещениях или в местах, обрабатываемых кислородом.
- 19. Не используйте и не наносите средства по уходу за кожей, косметические или медицинские препараты на кожу до или во время использования аппарата.
- 20. При демонтаже аппарата, убедитесь, что аппарат отключен от розетки эл.питания и все провода отключены от панели подключения на аппарате.
- 21. Будьте осторожны с нагретыми поверхностями (могут вызвать ожоги).
- 22. Не используйте температуры прожекторов более 50° C на частях тела с пониженной чувствительностью или пониженным кровообращением.
- 23. Пожалуйста, не спите на аппарате.
- 24. Не разбирайте, не чините и не перестраивайте изделие самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр при необходимости ремонта. (Риск удара электрическим током или травмы).
- 25. Пожалуйста, не помещайте руки или другие части тела в основное оборудование или вспомогательные части. (Риск удара электрическим током или травмы).
- 26. Чтобы уменьшить риск травм:
 - Беременным женщинам, людям находящимся на каком-либо лечении, необходимо проконсультироваться с врачом перед применением аппарата.
 - Если у вас кардиостимулятор, дефибриллятор, прочие имплантированные устройства или другие медицинские аппараты, проконсультируйтесь с врачом перед использованием.
 - Если у вас чувствительность или аллергия на нагрев, необходимо проконсультироваться с врачом перед использованием аппарата.

Меры предосторожности

- Не применяйте аппарат без одежды или простыни, всегда надевайте легкую одежду или стелите на аппарат простынь.
- Если были серьезные операции, особенно на спине и/или бёдрах, проконсультируйтесь с врачом перед использованием.
- Проконсультируйтесь с врачом, если есть раны или инфекции на коже в местах прямого воздействия на кожу изделием.
- Немедленно прекратите использование изделия при возникновении болезненных ощущений или дискомфорта, или при возникновении избыточных болевых ощущений от массажа.
- Не спите во время использования изделия.
- Не применяйте изделие после принятия алкоголя.
- Не позволяйте детям или домашним животным играть на изделии или вокруг него, особенно во время его работы.
- 27. При использовании аппарата, не разворачивайтесь, держите прямую осанку.
- 28. При установке высоких температур, есть риск получения ожогов, устанавливайте комфортную температуру. (В зависимости от комплекции и толщины кожного покрова, устанавливайте оптимальную температуру аппарата.
- 29. Люди с чувствительной кожей должны использовать низкие температуры (есть риск ожогов).



ОПАСНОСТЬ

Проверьте подключение изделия.
(Ненадлежащее подключение может вызвать удар электрическим током или повреждения)

- 30. Дети, которые не могут управлять температурой самостоятельно, а также люди с чувствительной слабой кожей, должны пользоваться изделием с осторожностью, устанавливая на продолжительный период низкую температуру, т.к. есть риск получения ожогов (Внимание! Используйте аппарат только надев легкую одежду).
- 31. При появлении каких-либо ненормальных симптомов во время использования аппарата, необходимо проконсультироваться с врачом перед продолжением использования.

Меры предосторожности

32. Не выдёргивайте шнур питания с силой (Риск удара электрическим током или возгорания).
33. Не помещайте легковоспламеняющиеся вещи, (свечи, сигареты и алкоголь), ёмкости с водой, тяжёлые или острые предметы на поверхность изделия (может вызвать удар электрическим током или повредить аппарат).
34. При размещении или сходе с изделия, будьте осторожны, есть риск падения.
35. Используйте аппарат согласно данной инструкции, в которой описаны методики и продолжительность (Используйте 1-2 раза в день и не используйте одновременно другие изделия, не одобренные производителем).
36. Не используйте внешний(е) прожектор(а) более 2-3 минут на одной части тела (излучатель должен быть перемещён на другую часть тела через 2-3 минуты).
37. При переноске не трясите и не роняйте аппарат.
38. Не закрывайте вспомогательный мат и не отсоединяйте пульт управления во время использования (Иначе рабочий режим автоматически прекратится).
39. У аппарата нагревающаяся поверхность. При интенсивном нагреве необходимо соблюдать осторожность.
40. Пожалуйста, не разливайте посторонние вещества на основном оборудовании и вспомогательных частях (может вызвать удар электрическим током, возгорание, травму или поломку аппарата).
41. Пожалуйста, не бросайте пульт управления и не натягивайте соединительный шнур (может вызвать травму и поломку оборудования).
42. Если аппарат работает не корректно или у Вас появились боли или недомогание, сразу же прекратите использование аппарата.
43. При наличии хронических заболеваний или острых болезненных состояний перед использованием изделия необходимо проконсультироваться с врачом.

Меры предосторожности

Методика заземления.

Изделие должно быть заземлено.

Заземление уменьшает сопротивление электрическому току в случае дефектов или поломок, которые могут вызвать удар электрическим током или повреждения. У изделия есть шнур питания. Шнур питания установлен в соответствии с сетями страны эксплуатации, подключаться должен к соответствующей розетке с заземлением.



Изменения или модификации, не одобренные производителем, снимают с него ответственность и могут лишить пользователя прав на гарантийное обслуживание.


Если подозреваете проблему в шнуре питания или розетке, проведите диагностику при помощи электриков или обслуживающего персонала. Это изделие рассчитано на напряжение 220-240В. Подключение кабеля эл. питания показано на рисунке 1 в разделе "Подключение" на странице 8. Для защиты аппарата при перепадах напряжения в сети необходимо использовать стабилизатор напряжения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиоволны, при неправильной установке или эксплуатации не по инструкции может вызывать помехи в радиоаппаратуре. Однако, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в конкретном месте установки, которое может быть определено путем включения и выключения оборудования. Пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:


- Переориентировать или переместить приёмную антенну.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приёмником.
- Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приёмник.

Как переносить аппарат

1. Перед переноской аппарата, отсоедините шнур питания, пульт управления, внешний прожектор от панели подключения основного мата и закройте вспомогательный мат. Два человека должны держать с разных сторон каркас, поднимать и переносить горизонтально.

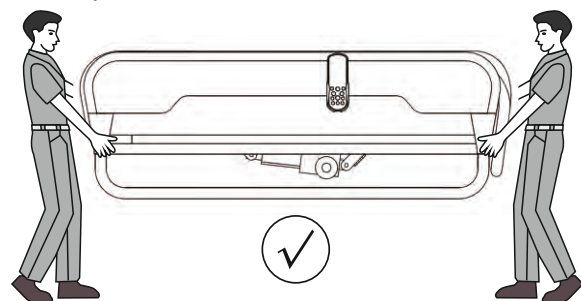


2. Не переносите изделие так, как указано ниже:

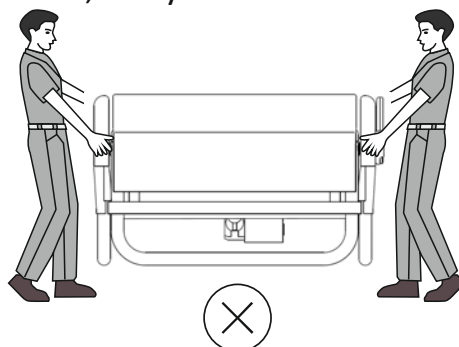


Перед тем, как включить питание

1. Откройте вспомогательный мат, потянув на себя и опустив на пол.

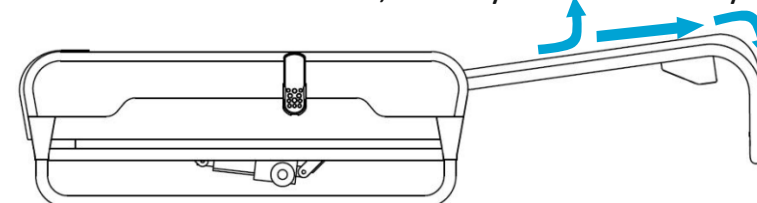


2. Между основным и доп. матом есть магнитный переключатель, перед тем, как включить пульт управления, дополнительный мат должен быть до конца выдвинут, чтобы магнитный переключатель замкнул эл.цепь. Можно слегка надавить на зону магнитного выключателя, если пульт управления не включается при выдвинутом дополнительном мате.

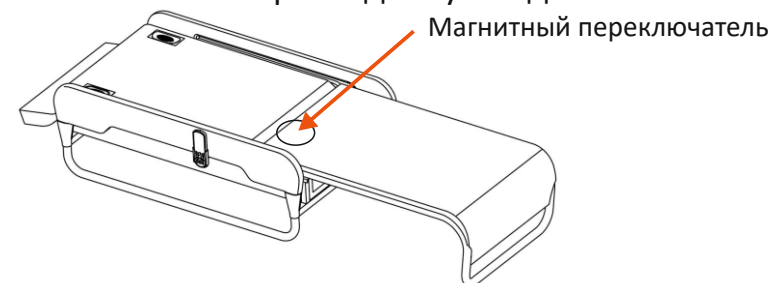


3. Будьте осторожны при установке угла наклона спинки.


Не кладите руки внутрь при установке угла наклона спинки.

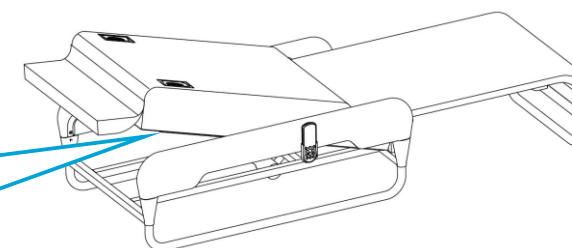

4. Закрывайте дополнительный мат по схеме, указанной ниже:

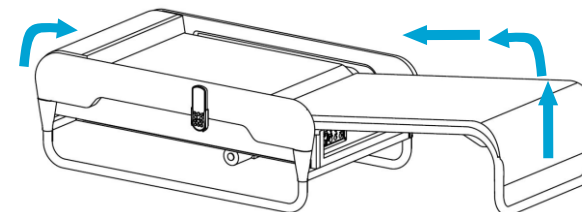

5. Когда аппарат в сложенном состоянии, он может быть использован в качестве кушетки.

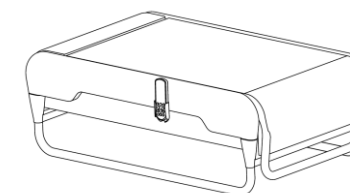

Использование пульта управления

3.1 Включение пульта управления (ПУ)



Включение: убедитесь в правильном подключении пульта. Включите основной выключатель на соединительной панели основного мата. Нажмите кнопку  на пульте управления, дисплей высветит начальные установки (температуру, время и т.д.).

Выключение: Продолжительное нажатие кнопки  на ПУ (около 2-х секунд) отключает аппарат, внутренний прожектор возвращается в исходное положение, после этого пользователь может отключить питание на панели подключения нажав на главный выключатель, пульт управления будет мигать раз в 10 секунд для напоминания необходимости выключить неиспользуемый аппарат.


Пауза: нажмите на кнопку  дважды. ПУ перейдет в мигающий режим. Нажмите кнопку еще раз и работа аппарата возобновится.

Проверьте экран ПУ:

- показывает-ли экран текущую интенсивность и температуру нагревательных элементов.


- при включении ПУ внутренняя каретка перейдет в исходное верхнее положение.

Управление программами 1-11 смотрите на странице 31.


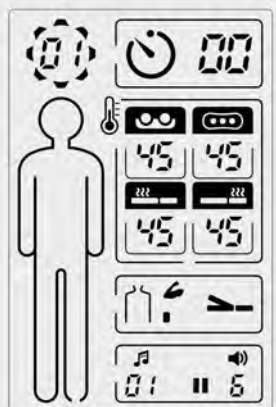


3.2 Установка времени работы аппарата

Нажмите кнопку таймера , на экране будет мигать символ времени. Нажатием кнопки «Больше» или «Меньше» установите желаемое время работы аппарата от 10 до 90 минут. По умолчанию у каждой программы установлено определенное время. **ВНИМАНИЕ.** Прочитайте меры безопасности перед использованием. Наилучший эффект достигается при использовании в течении 30-60 минут утром или вечером.

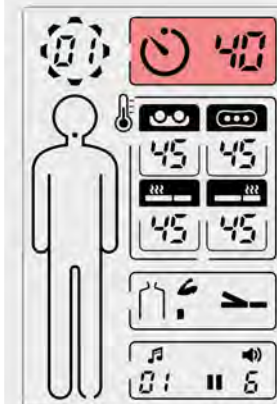

3.3 Установка температуры

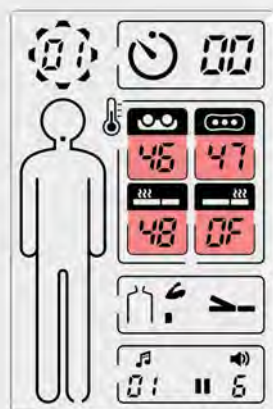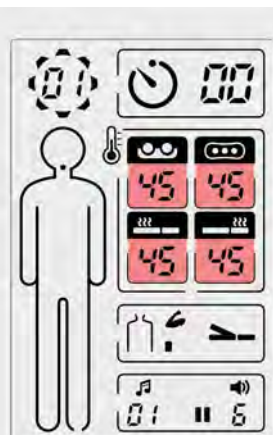

Настройка температуры сочетается с кнопками «Больше» или «Меньше», они устанавливают температуру внутреннего, внешнего прожекторов, нагревательных панелей основного и дополнительного матов. Нажмите кнопку температуры один раз, будет мигать символ внутреннего прожектора, после этого нажмите кнопку «Больше» или «Меньше» для установки температуры. Путём нажатия кнопки будет выбран следующий нагревательный элемент



(внутренний прожектор, внешний прожектор, тепловая панель осн-го мата, тепловая панель доп-го мата) и символ выбранного теплового элемента будет мигать, в сочетании с кнопками «Больше» или «Меньше» устанавливается желаемая температура +30°C - +65°C. По умолчанию температура всех нагревательных элементов установлена на +45°C. Когда установка температуры закончена, на экране появится температура нагревательного элемента в данный момент и через несколько минут достигнет установленной температуры. Для выключения выбранного нагревательного элемента, нажмите на кнопку в течении 3 сек.

ВНИМАНИЕ. Используйте температурный режим по ощущениям во избежании ожогов.

Отклонения от установленной пользователем температуры в пределах +/- 5 градусов являются нормой и не свидетельствует о неисправности оборудования



3.4 Управление функцией интенсивности массажа

Настройка интенсивности. По умолчанию будет установлен 0-й уровень. При нажатии кнопки 1 раз на "Индикаторе интенсивности" будет показано одно деление. Внутренние ролики поднимутся и будут работать на 1-м уровне интенсивности. При нажатии на кнопку 2-й раз на "Индикаторе интенсивности" будет показано 2-а деления. Внутренние ролики поднимутся выше и будут работать на 2-м уровне. При нажатии на кнопку 3-й раз на "Индикаторе интенсивности" будет показано 3-и деления. Внутренние ролики поднимутся еще выше и будут работать на 3-м уровне. При нажатии на кнопку 4-й раз установится 0-й уровень. На 0-м уровне (ручное управление) можно произвольно управлять интенсивностью кнопками «Больше» или «Меньше» .


ВНИМАНИЕ.

- Используйте уровни интенсивности по самочувствию. Чем больше интенсивность, тем сильнее воздействие внутренних роликов на мышцы спины и больше прогиб позвоночника во время использования аппарата лежа на спине.

- Ручное управление интенсивностью - уровень 4 не может быть использовано при Зонном Режиме и Прижигании.

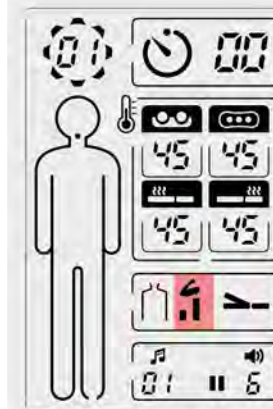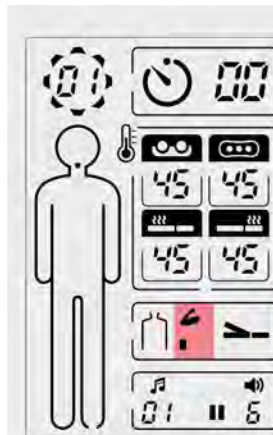


3.5 Управление углом наклона основного мата

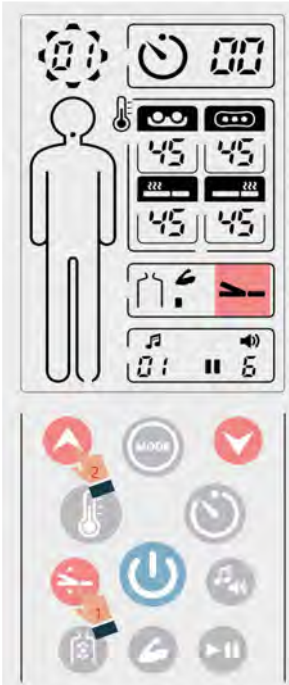

Управлять наклоном основного мата можно во время работы аппарата. Нажав кнопку наклона , как показано на рисунке слева, начнет мигать этот символ на экране. Кнопками «Больше»  или «Меньше» , можно устанавливать угол наклона основного мата от 0 до 35 градусов. **ВНИМАНИЕ.** Увеличение угла наклона основного мата уменьшает воздействие внутренних роликов. Используется для тех, кому это воздействие нужно уменьшить или кому тяжело вставать после окончания использования аппарата.

3.6 Управление музыкой и звуком

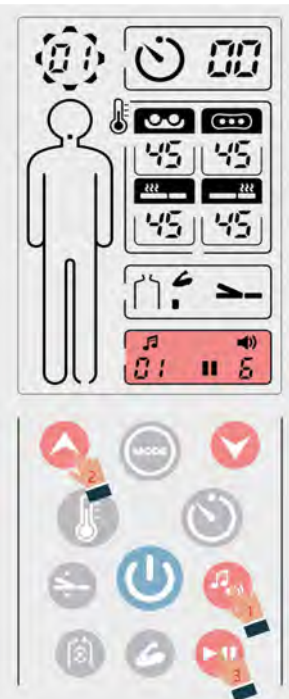

Настройка музыки/громкости сочетается с кнопками «Больше»  или «Меньше»  : нажмите кнопку  Музыка/Громкость один раз, загорится знак музыки, после этого нажмите кнопку «Больше»  или «Меньше»  для выбора мелодии (1-99). При долгом нажатии кнопки можно быстро искать необходимую мелодию. При двойном нажатии кнопки  Музыка/Громкость загорится знак громкости  (1-6 уровней). Путём нажатия кнопки  Музыка/Громкость, знак будет меняться на знак музыки  или громкости .

		
Выбор мелодии	Воспроизведение/ Пауза	Громкость
0-99		1-6

3.7 Выбор полуавтоматического режима (ПАР):

Прижигание (П)/Зонный массаж (ЗМ)

Включите питание нажатием на кнопку . Нажимая на кнопку  сразу или во время работы аппарата можно переводить работу внутренней каретки в режим **П** нажав на кнопку  1 раз или в режим **ЗМ** нажав на кнопку  дважды. Начнут мигать соответствующие символы: **П**  и **ЗМ** . По умолчанию **П** установлено на ~3 минуты, а режим **ЗМ** на 10 минут работы в диапазоне 12см. Нажав кнопку 3-й раз кнопку  или по истечении времени работы в **П** или **ЗМ**, аппарат перейдет в режим работы в котором был до включения этих режимов.

Прижигание (П) производят 4 нефритовых ролики внутреннего прожектора, находящиеся в одном положении ~ 3 мин по установленной ранее температуре на внутреннем прожекторе (см..п.3.3 на стр.27).


Нажатием и удерживанием кнопки «Больше»  или «Меньше» , в режиме **П** можно перемещать внутренний прожектор в другие точки и в режиме **ЗМ** устанавливать зону массажа.

Если Интенсивность отключена режим **П** будет работать без эффекта "Дыхание". При 1-3 Интенсивности нефритовые ролики внутреннего прожектора будут подниматься и опускаться на заданный уровень 1-3 Интенсивности (эффект "Дыхание" смотрите на стр.33).

ВНИМАНИЕ: Рекомендуемое время прижигания в 1 точке не более 3 мин.



3.8 Управление программами 1-11

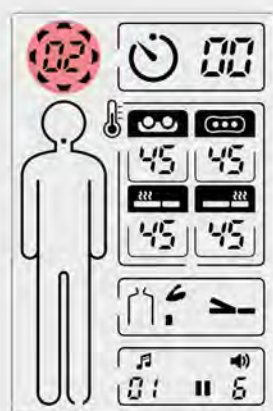

Выдвиньте дополнительный мат (смотрите странице 7 - Аппарат в разложенном состоянии). Лягте на основной мат так, чтобы ноги были на дополнительном мате. Примите удобное положение. После включения кнопки  питания на пульте управления и короткого звукового сигнала, внутренняя каретка с нефритовыми роликами начнет движение - сканирование позвоночника. Каретка должна двигаться вдоль позвоночника с обеих сторон от копчика до 1-го шейного позвонка.

Нажатиями кнопки  (как показано на рисунке слева), выберите автоматическую программу 1-11 (схема движения внутренних роликов и их остановка указаны далее в разделе "Автоматические программы"). На экране высветится выбранная программа 1-11. После окончания сканирования, автоматически начнет работу выбранная автоматическая программа. На странице 26-29 смотрите установку: времени, температуры нагревательных элементов, угла наклона основного мата, проигрывания мелодий.

При использовании автоматической программы 2 за ~5мин до окончания программы, прозвучит 3 коротких сигнала и каретка остановится на 60 секунд. В это время вы можете перевернуться для массажа абдоминальной области.

ВНИМАНИЕ. Не допускайте, чтобы внутренние ролики двигались по ребрам, это может привести к серьезным травмам.

После завершения выбранной программы прозвучит короткий сигнал и на таймере высветится 88. Через 60 сек отключится ПУ и внутренняя каретка перейдет в исходное состояние (к низу основного мата).

3.9 Использование аппарата в сложенном состоянии

В сложенном состоянии аппарата вы можете использовать нагревательные элементы: дополнительного мата и подключенный 3-х или 9-ти сферный нефритовый прожектор.

Нажмите кнопку температуры  один раз, будет мигать символ внешнего прожектора, после этого нажмите кнопку «Больше»  или «Меньше»  для установки температуры, как показано на среднем рисунке справа. Путём нажатия кнопки , выберите символ дополнительного мата и установите необходимую температуру как указано выше.

Возможна установка времени работы этих нагревательных элементов в сложенном состоянии аппарата.


	
Внешний прожектор	Нагревательный элемент доп. мата
+30°C ~ +65°C	

ВНИМАНИЕ. Температура внутренних нефритовых роликов и нагревательных карбоновых элементов основного мата не будут высвечиваться на экране в данном режиме.



Использование программ

Перед использованием аппарата, проверьте положение внутреннего прожектора (рис. 1). Если его положение не в исходном состоянии, включите аппарат и нажмите 1 раз кнопку , внутренний прожектор вернется в исходное положение. Ложитесь головой в сторону основного мата, чтобы аппарат произвел правильное сканирование позвоночника для лучшего эффекта.

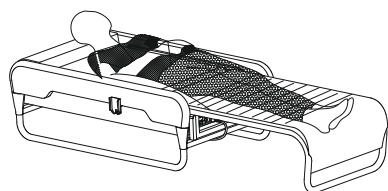

Лягте как указано на рисунке слева. Нажмите кнопку  и выберите программу с помощью кнопки , внутренний прожектор начнет сканирование позвоночника. Затем начнет работу выбранная вами программа. Если вы хотите произвести сканирование позвоночника снова, нажмите кнопку  и удерживайте 3 сек, затем нажмите кнопку  снова.

Условные обозначения

●●●●●● Сканирование (во время сканирования Зонный Режим и Прижигание не работают).

▲ Эффект "Дыхание" работает в режиме "Прижигание".

● Прижигание.

Эффект «Дыхание» Внутренний прожектор поднимает и опускает нефритовые ролики на 3 уровня, как показано на рисунке справа, производят массаж SHIATSU.












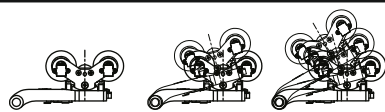


Схема работы внутреннего прожектора в режиме автоматических программ:

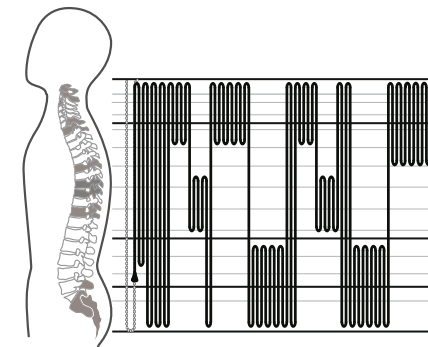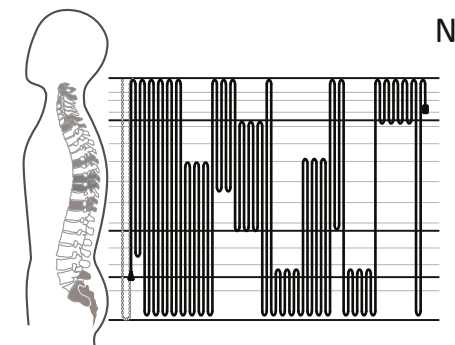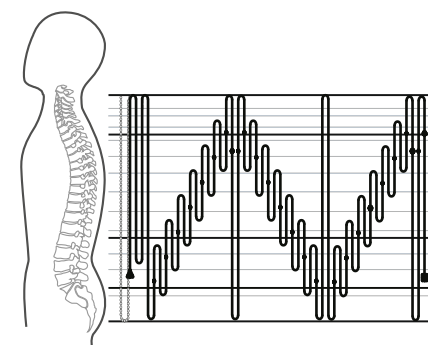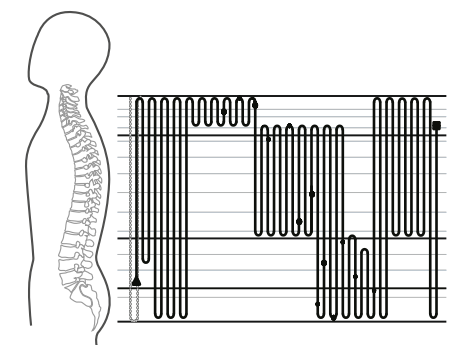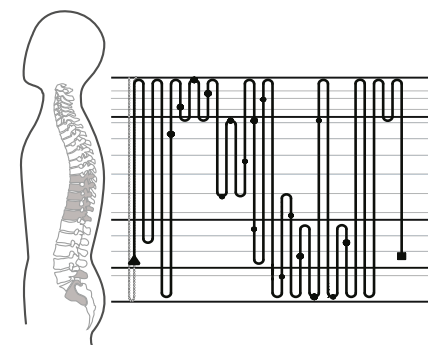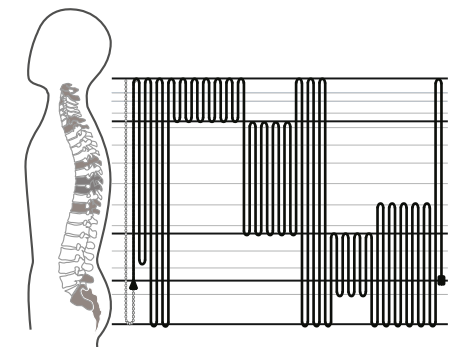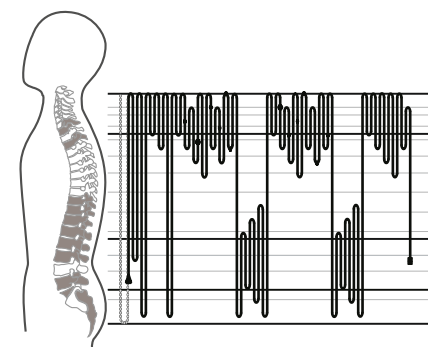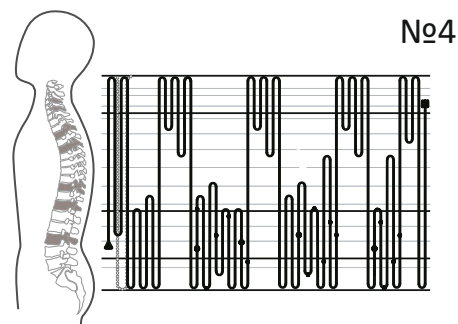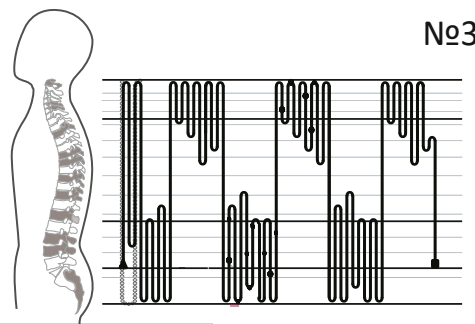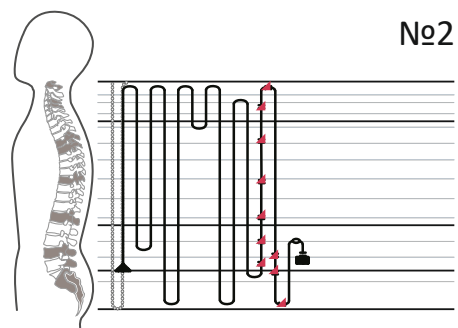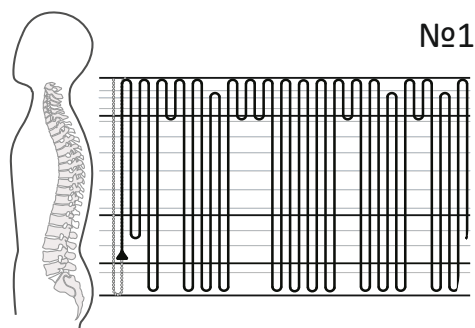

Неисправности и порядок их устранения

Коды неисправностей

При включении аппарат не работает - проверьте: 1. Подключение силового кабеля; 2. Включен-ли главный выключатель на панели подключения аппарата; 3. Правильно-ли подключен пульт управления; 4. Замкнут-ли магнитный выключатель, расположенный в левом нижнем углу основного мата. Поставьте нижний мат в правильное положение; 5. Показывает-ли пульт управления коды ошибок указанные в таблице.

Если происходит ошибка во время процедуры, соответствующее сообщение выводится на дисплей пульта управления

Обозначение	Значение	Устранение неисправности
E1-E2	Ошибка температурного датчика.	Проверьте температурный датчик и провода подключения.
EN	Ошибка основной платы PCB	Замена основной платы PCB. Для замены необходимо обратиться в сервисный центр или к продавцу для ремонта.
E3	Ошибка основного двигателя.	Проверьте работу основного мотора и провода подключения.
E7	Обрыв контакта между основной платой PCB и основным двигателем.	Проверьте провода подключения между PCB и основным двигателем.
E4	Перегрузка двигателя подъема каретки.	Проверьте провода подключения.
E5	Ошибка работы двигателя подъема каретки.	Свяжитесь с сервисным центром для ремонта.

Если указанные методы устранения неисправностей не помогли, а также при появлении других неисправностей свяжитесь с сервисным центром (info@lilotus.ru) или обратитесь в магазин, в котором было приобретено изделие. На изделие установлена гарантия 2 года.

Гарантия

Гарантийный Талон

Наименование		Продавец: Юр. адрес:
Серийный номер модели		
Покупатель		
Адрес		
Телефон		ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД 2 года с момента передачи товара покупателю.
Дата покупки		

Гарантийный срок на продукцию составляет 2 года с момента передачи товара покупателю. Продукция предназначена для домашнего использования в бытовых целях. В случае использования оборудования в коммерческих целях гарантийный срок сокращается до 1 года с момента передачи товара покупателю. Аппарат является технически сложным электробытовым изделием. В случае любого изменения в работе аппарата прекратите его использование. Не пытайтесь ремонтировать аппарат самостоятельно.

В случае возникновения неисправностей обратитесь в ближайший сервисный центр info@lilotus.ru, тел.: +79162637022 или к продавцу, у которого вы приобрели данное оборудование.

Гарантия не распространяется в следующих случаях.

1. В случае нарушений правил и условий эксплуатации.
2. Если аппарат имеет следы попыток самостоятельного ремонта.
3. Механические повреждения.
4. Повреждения вызванные попаданием внутрь аппарата посторонних предметов, веществ, жидкостей и насекомых.
5. Повреждения вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.
6. На расходные элементы аппарата (защитные простыни, чехлы, лампочки).

Данной подписью покупатель подтверждает, что ознакомился и соглашается с условиями гарантии, получил инструкцию по использованию на русском языке, и подтверждает, что оборудование проверено в его присутствии и находится в рабочем состоянии _____/_____

Изготовитель: Зеджянг Медицин Хэлс Продукт И/Е СО., ЛТД. Адрес: 310, Н.Жонгшан Роуд, Ханжу, 310003, Китай. Тел.: +8657128935872.

Страна изготовитель Китай.

Импортер: ООО "Лотос", 119571, г. Москва, пр-т Вернадского 123/2, комната 9Б, Россия, www.lilotus.ru, эл.адрес: info@lilotus.ru